


AB WANN TESTS DURCHFÜHREN?

Beispiel der Kinetik einer trächtigen Kuh

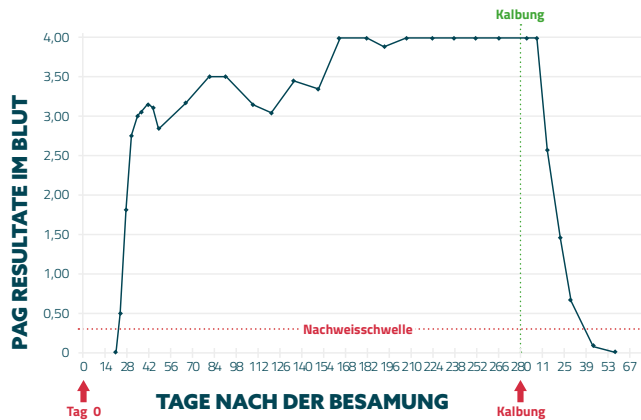

DIE PAG (TRÄCHTIGKEITSASSOZIIERTE PROTEINE) SIND AB 28 TAGE NACH DER BEFRUCHTUNG NACHWEISBAR

Hinweis: Die Kuh sollte erst 60 Tage nach dem letzten Kalben getestet werden, da PAG aus der vorherigen Trächtigkeit noch nachweisbar sein können.

TARIF

- 6,50€ MwSt für **arsia+** Beitragszahler (Tarif 2024).

Arsia
asbl

Arsia
asbl

Allée des Artisans, 2 - 5590 CINEY
Tel: 083 23 05 15
E-mail: labo@arsia.be

TRÄCHTIGKEITSTEST
an BLUTPROBEN

IDEXX
LABORATORIES



TRÄCHTIGKEITSTEST an BLUTPROBEN



ZUVERLÄSSIGKEIT

Test durchführbar **ab 28 Tage** nach dem Decken oder der Besamung.



REAKTIVITÄT

Eine Kuh, die nicht trächtig ist, kann zum richtigen Zeitpunkt wieder zur Zucht eingesetzt oder reformiert werden.



PRODUKTIVITÄT & RENTABILITÄT

Zusätzlich zu der üblichen Überwachung der Fortpflanzung (Überwachung der Brunst, Ultraschall usw.) trägt dieser Ansatz dazu bei, die **Produktivität** und damit die **Rentabilität** zu optimieren.



PRAKTISCH!

Der Test kann mit der Prophylaxe-Blutprobe durchgeführt werden (oder zu anderen Zeitpunkten: beim Einstallen oder beim Weideauftrieb).

Die Blutentnahme ist manchmal **weniger riskant** und für den Betreiber schneller als der Ultraschall (z. B. im Fall von Zwangständen).

Der Test beruht auf dem ELISA-Nachweis von PAG (Trächtigkeitsspezifische Proteine) im Serum der Kühe. Entnahme in einem trockenen Röhrchen.

WELCHE TESTPERIODEN, FÜR WELCHE ZIELE IN DER MUTTERKUHHALTUNG?

BEIM EINSTALLEN

Identifizieren Sie nicht tragende Kühe oder Färsen, bevor sie die Winterration fressen.

BEIM WEIDEAUFTRIEB

Für eine Gruppe, die im Winter zur Fortpflanzung gebracht wurde, identifizieren Sie die nicht tragenden Kühe, bevor diese auf die Weide gehen.



BEI JÄHRLICHEN KONTROLLEN

Bitte Sie das Labor, Trächtigkeitstests an den Blutproben durchzuführen, die im Rahmen einer Bilanz oder Aufrechterhaltung entnommen wurden.

VON FALL ZU FALL


Möglichkeit, eine oder mehrere Kühe jederzeit zu testen, wenn Zweifel bestehen (z.B. beim Ankauf oder Abgang zum Schlachthof).

BENUTZUNGSBEDINGUNGEN

- **Zuverlässiger Test ab dem 28. Tag der Trächtigkeit.**
- **Nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem Kalben verwenden.**

ACHTUNG, mit diesem Test können weder das Schwangerschaftsstadium, noch das Geschlecht des Fötus, das Vorliegen von Zwillingbildung, noch das Fehlen von Missbildungen festgestellt werden.

WELCHE RESULTATE SIND MÖGLICH ?

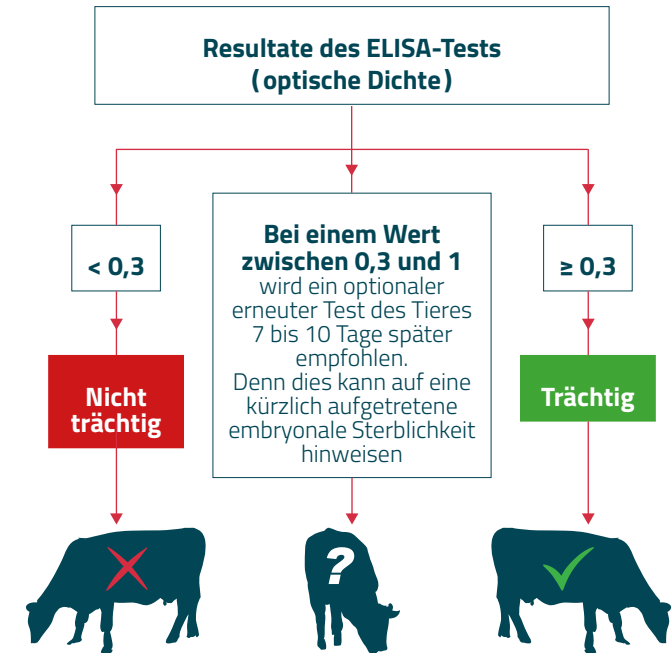

VERBESSERUNG DER FORTPFLANZUNGSLEISTUNG

- **Früherkennung** nicht tragender Kühe, um sie so schnell wie möglich wieder in die Fortpflanzung zu bringen.
- Nicht tragende Kühe können bewusst **reformiert** werden.
- Auch zur Erkennung von **Embryonalverlusten** nützlich
- Einsatzmöglichkeit zusätzlich zum Ultraschall.